

HaemoCerTM PLUS

Polvo Hemostático

100%
Reabsorbible

Hecho en
Alemania

Natural - Seguro - Efectivo

BioCer

BioCer

HaemoCer™ PLUS

HaemoCer es un sellador hemostático con polisacárido hidrofílico de rápida acción hecho a base de almidón purificado, que al entrar en contacto con la sangre la deshidrata creando una alta concentración de plaquetas, glóbulos rojos y proteínas de coagulación en el lugar del sangrado, lo cual acelera la cascada de coagulación fisiológica.

Al interactuar con la sangre se produce rápidamente un gel transparente que cubre y forma una barrera mecánica sobre el sangrado, reduciendo así la formación de adherencias post-quirúrgicas. HaemoCer se reabsorbe luego de 24 a 48 hrs. de ser aplicado.

Natural

- Hecho a base de plantas
- No contiene elementos de humanos ni de animales
- Completa reabsorción

Seguro

- Su rápida reabsorción minimiza los riesgos de reacciones a cuerpos extraños y la formación de granulomas
- Reducción de las transfusiones homólogas y las donaciones de sangre

Efectivo

- Doble capacidad de absorción, embalaje compacto, reduciendo el volumen de almacenamiento
- Fácil utilización directa de bodega, no requiere almacén especial ni tiempo de descongelación

Facilidad de uso, Técnica de aplicación DAPI

Secar

Retire el exceso de sangre acumulada mediante aspiración o con una gasa



Aplicar

Aplique HaemoCer™ PLUS inmediatamente y cubriendo toda el área del sangrado



Presionar

En caso de sangrado abundante, aplique compresión suave sobre el sangrado con una gasa seca hasta por 2 minutos



Irrigar

Irrigue bien antes de Retirar suavemente la gasa para garantizar Que la matriz de gel permanezca en el sitio del sangrado



Hemostático
de última
generación

BioCer Entwicklungs-GmbH
Nuevos materiales para la practica médica

www.biocer-gmbh.de

Tecnología Natural

La ingeniería de este polisacárido hemostático absorbible (APH) incorpora un sofisticado procesamiento denominado PURE (Ingeniería de Polisacárido Ultra – Hidrofílico reabsorbible) de reticulación de polímeros basados en vegetales, que crea partículas ultra hidrofílicas biocompatibles.

Uso versátil:

- Tratamiento de sangrados localizados o difusos.
- Para el sangrado en la línea de suturas.
- Sustituye selladores de fibrina en cirugía vascular.




- Sustituye la cera para hueso.
- Reduce el uso de los electrocauterios.

Características principales:

- 100% Natural, sintético y absorbible.
- Minimiza el riesgo de infecciones y granulomas.
- No requiere preparación previa.
- Rápida acción.
- Reduce la necesidad de transfusiones.

100%
Reabsorbible

Origen
Vegetal

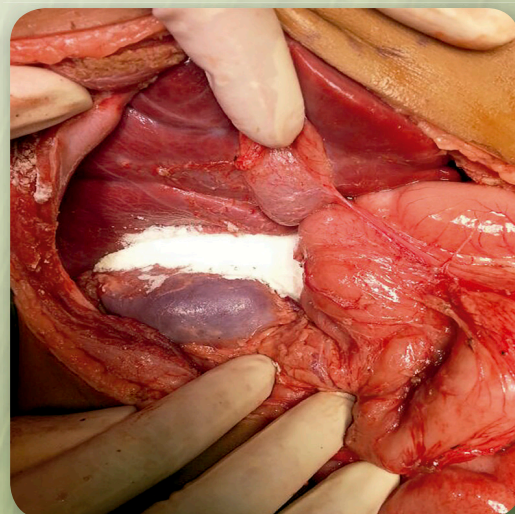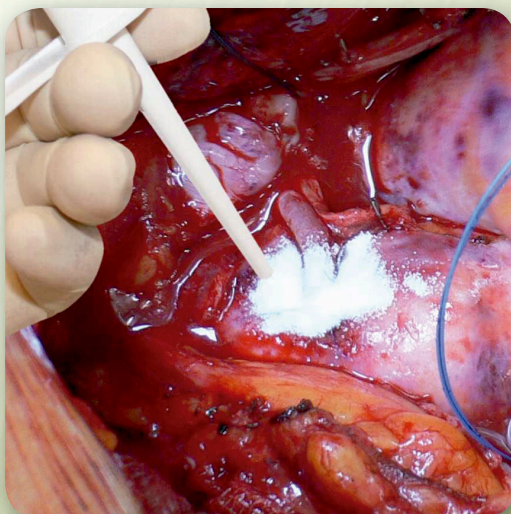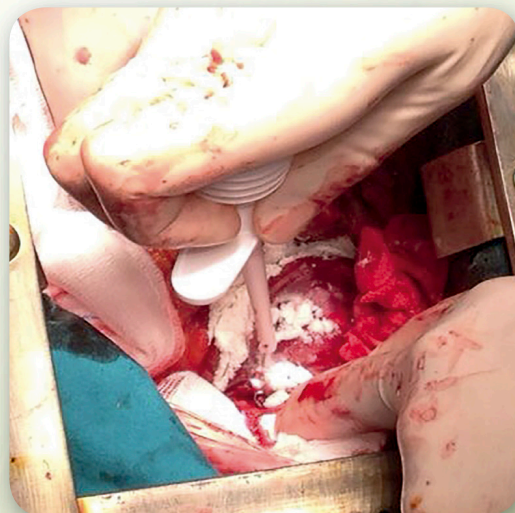



FARMEX
ADVANCED MEDICAL DEVICES

FARMEXDI S de RL de CV

☎ (442) 962-33-63
☎ (+52 55) 4319 43-09
✉ ventas@farmex.com.mx
🌐 farmex.com.mx

BioCer

Uso versátil de HaemoCer™

- Recomendado en sangrados localizados y difusos.
- Para sangrado alrededor de la líneas de sutura.
- Sustitución de pegamento de fibrina para la hemostasia en cirugía vascular.
- Sustitución de cera de hueso en sangrado del hueso.
- Disminuir el uso electrocauterio evitando el daño tisular asociado.

Áreas de aplicación

- Cirugía cardíaca, Vascular y Torácica.
- Cirugía General.
- Cirugía de trasplante.
- Traumatología y Ortopedia.
- Cirugía de Tumores.
- Cirugía Oral y Maxilofacial.
- Cirugía ORL.
- Urología / Ginecología.
- Ortopedia.
- Cirugía plástica.
- Cirugía por quemaduras.
- Neurocirugía.
- Cirugía pediátrica.

Visión general del producto HaemoCer™ PLUS

HFP203	3g	5 pcs
HFP205	5g	5 pcs
HFZ101	440 mm	5 pcs



BioCer

BioCer Entwicklungs-GmbH

Ludwig-Thoma-Str. 36c · 95447 Bayreuth · Germany · Tel. +49 (0)921 78 77 70 o
Fax. +49 (0)921 78 77 70 79 · info@biocer-gmbh.de · www.biocer-gmbh.de

